

fläsh.

Совершенное отбеливание.



WHITEsmile®
25
YEARS - QUALITY
Made in Germany

flaesh.com
flashdental.ru



fläsh.

Совершенное отбеливание.

Залог успеха вашей клиники

Последние исследования показывают, что 85% людей хотели бы иметь более светлые зубы. С другой стороны, не все пациенты имеют представление о том, что такого результата можно добиться при помощи отбеливания, избежав инвазивного вмешательства.

Современная стоматология позволяет создавать идеальные реставрации, максимально приближенные к естественной, природной физиологии пациента. Высокотехнологичное протезирование и восстановление, художественные реставрации, ортодонтическое лечение с использованием прозрачных систем – элайнеров, позволяет большему числу взрослых людей получить естественную улыбку с ровными зубами.

Сочетайте эти процедуры с отбеливанием зубов **fläsh**, и ваши пациенты получат еще больше удовольствия от белоснежной улыбки!

Ваша клиника может продемонстрировать больше возможностей и стать для пациентов **Центром идеальных улыбок.**

Почему fläsh?

WHITEsmile – немецкая компания, специализирующаяся на отбеливании зубов более 25 лет.

Эргономичное управление, безопасное применение и точное позиционирование – гарантируют отличные результаты системы **fläsh**.

WHITEsmile[®]

25

YEARS - QUALITY
Made in Germany



fläsh.

Лампа для отбеливания


Легкое управление – безопасные процедуры

- Новейшая высокопроизводительная светодиодная технология с интенсивным сфокусированным световым спектром и видимым синим светом.
- Срок службы светодиодов более 10 000 применений.
- Эргономичное управление благодаря системе Easy lock – позволяет идеально расположить лампу для отбеливания перед пациентом.
- Специальные настройки для чувствительных зубов и программа отбеливания одного зуба.
- Возможность варьирования мощности светового потока.
- Оптимальные результаты с отбеливающим гелем **fläsh** для клинического отбеливания, на 7-8 оттенков светлее исходного цвета.
- Безопасная рабочая температура.
- LED технология, световой спектр 460 нМ, 190 мВт/см², 100-240 В.
- Система учета рабочего времени для отбеливающего геля **fläshcard**.

Артикул: 3401



3 высокоэффективных
светодиода

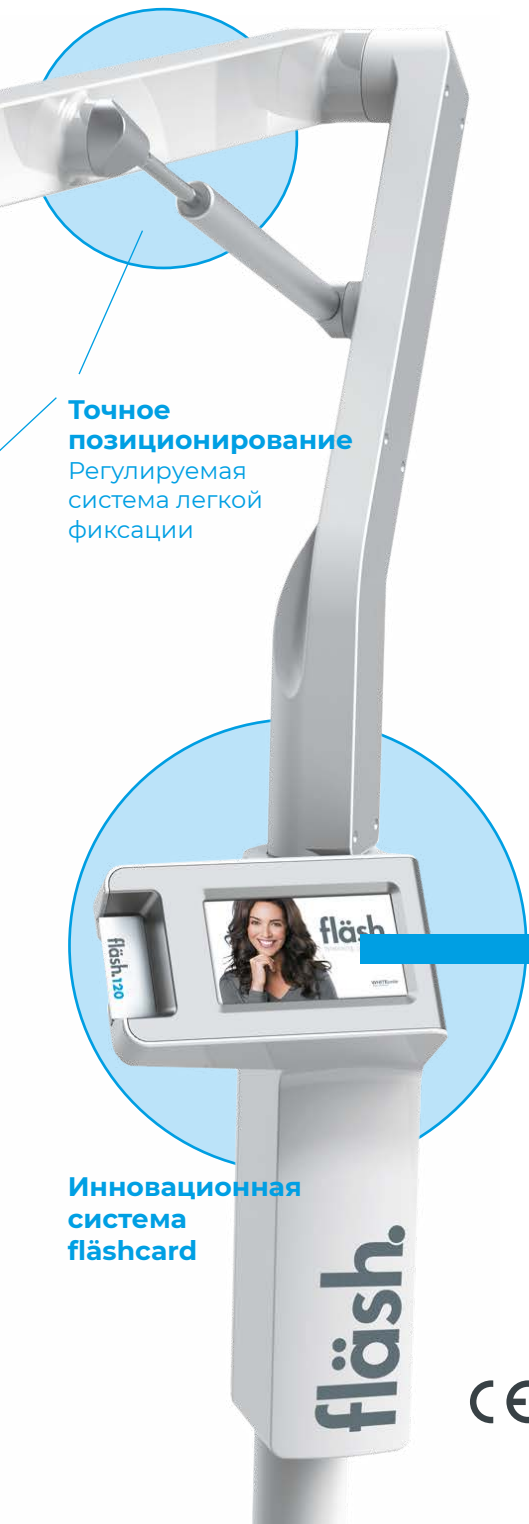


Полноцветный сенсорный экран

3 программы отбеливания


Постоянное, импульсное и отбеливание одного зуба.



Виртуальные инструкции непосредственно на устройстве

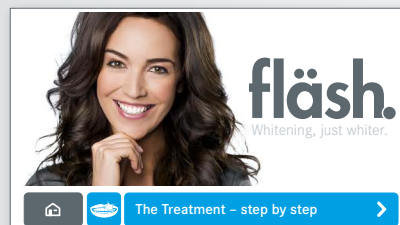

Определение достигнутых оттенков отбеливания

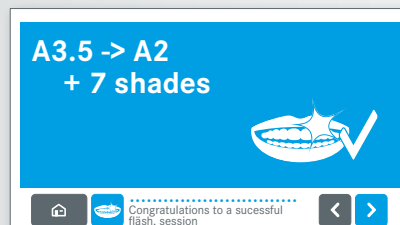


Точное позиционирование

Регулируемая система легкой фиксации

Инновационная система fläshcard

fläshcard

Система управления временем.

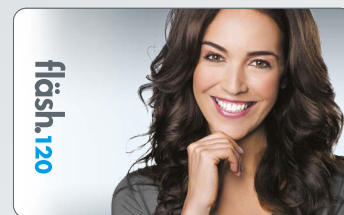

Видео

Лечение – шаг за шагом
www.flash.com



fläsh.

Система профессионального отбеливания зубов

Разработано со специалистами – идеальные результаты

fläsh – система клинического светового отбеливания.

- В состав геля для отбеливания входят зеленые пигменты активного хлорофилла, которые позволяют контролировать индикацию цвета геля под действием лампы.
- Основное действующее вещество – 32% пероксид водорода. Эффективное отбеливание за 3-4 сеанса по 15 минут за один прием.
- Точное позиционирование, контроль мощности светового потока для отбеливания зубов с высокой чувствительностью.
- Возможность проводить процедуру на ограниченном участке или одиночном зубе.
- Лечение можно поддерживать с помощью использования геля для домашнего отбеливания **fläsh**.



Зеленый гель для точного нанесения



Точное позиционирование световода на губном ретракторе



Гибкие губные ретракторы для легкого и комфортного введения в полость рта пациента.

Выпускается также в маленьком размере.

Клиническое отбеливание

Набор на 2 пациентов

- Гели отбеливающие 32% НР 4 г – 2 шт.
- Коффердамы жидкие для защиты десен 1,5 г – 2 шт.
- Муссы после отбеливания 1,2 мл – 2 шт.
- Ретракторы для губ, автоклавируемые – 2 шт.
- Типсы – 8 шт.
- flashcard на 120 мин.
- Шкала оттенков.
- Зубная паста flash 15 мл – 2 шт.
- Аксессуары.

Артикул: 3102R



fläsh.

Система домашнего отбеливания

С изготовленными в лаборатории индивидуальными капями

Гель домашний отбеливающий, 3 мл в шприцах

- Мусс после отбеливания для десенсibilизации и реминерализации.
- Отбеливающие пленки.
- Светоотверждаемый блокатор для нанесения на модель зуба.
- Концентрация: 16% CP (~ 5,6% HP) для применения ночью или днем.

Артикул: 3202

CP = пероксид карбамида

HP = пероксид водорода

Для пациентов старше 18 лет.



fläsh.

Зубная паста
Уход и восстановление

Интенсивный уход для белизны зубов с 30% ксилитола и 15% гидроксилпатита

Зубная паста **fläsh** – это идеальный уход для белизны зубов – до и после отбеливающих процедур. Предназначена для ежедневного использования. Даже для чувствительных зубов. Укрепляет эмаль благодаря 15% гидроксилпатита.

Двойная защита от кариеса благодаря фториду натрия и высокому содержанию ксилитола. Неабразивная.

- 11100 ppm фторида натрия, 30% ксилитол, 15% гидроксилпатит.
- Без SLS. Без триклозана. Без отбеливающих компонентов.
- Вкус: лайм-мята, 75 мл.

Артикул: 3320





Эстетическая стоматология

Лучшая интеграция в вашей клинике

Отбеливание зубов сегодня является важной частью эстетической стоматологии. Для того, чтобы интегрировать его в свою клинику, есть несколько рекомендаций, которые могут быть полезны:

Обучение персонала:

Лампа для отбеливания **fläsh** оснащена функцией управляемого лечения, при помощи которой легко проводить процедуру. На сайте flaesh.com также есть видео с пошаговой инструкцией. Начните с отбеливания зубов ваших сотрудников, что создаст пример отбеливания в вашей клинике.

Повышение осведомленности пациентов о вашей услуге отбеливания:

Большинство пациентов приходят не только для того, чтобы пройти процедуру отбеливания. Команда клиники и стоматолог легко могут предложить пациентам возможность получить идеально белую улыбку в сочетании с другими стоматологическими процедурами.

Отбеливание делает вашу великолепную работу более заметной:

Реклама естественно выглядящих результатов имплантации и великолепной ортодонтической работы наиболее эффективна при использовании фотографий «до и после». Поэтому сочетание результатов стоматологического лечения с отбеливанием зубов, будет представлено еще более эффективно и наглядно в качестве рекламы вашей клиники в социальных сетях.

Узнайте условия проведения демоотбеливания у вашего менеджера.

fläsh.

Обзор продукции

3401 Лампа для отбеливания fläsh

1 x Лампа для отбеливания / 3 x Защитные очки / 1 x Акриловая рекламная табличка, 60 x 60 см / 3x Ретракторы для губ автоклавируемые / запасная fläshcard на 120 мин



3102R Система fläsh для профессионального отбеливания в кабинете 32% HP Набор на 2 пациентов, 32% HP, 4 г

2 x Гели отбеливающие 32% HP 4 г, 2 x Коффердамы жидкие для защиты десен 1,5 г / 2 x Муссы после отбеливания 1,2 мл, 2 x Ретракторы для губ, автоклавируемые / 8 x Типсы / fläshcard на 120 мин / Шкала оттенков / 2 x Зубные пасты 15 мл / Аксессуары
32% HP: Медицинское отбеливание зубов только по медицинским показаниям



3202 Система flash для домашнего отбеливания Набор на 1 пациента, 4 x гель, 16% CP, 3 мл

1 x Мусс после отбеливания 3 мл
2 x Фольга / 1 x Блокатор / 1 x Индивидуальный контейнер для капли
Косметическое отбеливание зубов



3320 Зубная паста fläsh

75 мл, 30% Ксилитол, 15% Гидроксилапатит
Вкус: лайм-мята



Изображения продукции могут отличаться.

fläsh.

Совершенное отбеливание.